

Controllo della qualità del sonno (poligrafia)

Misura la qualità del tuo sonno (soprattutto se sospetti delle apnee notturne).

Se, grazie all'uso di Velumount®, il russamento è stato eliminato, non vuol dire che sia stato risolto anche il problema delle apnee notturne. Puoi acquistare un poligrafo tramite il tuo medico curante o da Velumount GmbH.

Per l'acquisto da Velumount GmbH puoi prenotare dall'area clienti del sito web Velumount® inserendo il tuo numero cliente, oppure telefonando al numero +41 (0) 31 351 00 71. Il poligrafo ordinato viene inviato per posta, oppure puoi passare a ritirarlo.

I nostri poligrafi misurano possibili apnee, ipopnee, riduzione dell'ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca, e consentono di analizzare con precisione la qualità del respiro durante il sonno.

Conservazione

Tutti i prodotti Velumount® vanno conservati tra -15°C e +50°C, in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia

Dopo ogni utilizzo il prodotto Velumount® va lavato a mano in acqua corrente.

I prodotti Velumount® si possono pulire anche in acqua bollente per disinfettarli. Se si notano impurità all'interno del tubicino di silicone, il prodotto Velumount® va immediatamente sostituito.

Per quanto riguarda gli anelli Velumount® Intro, bisogna fare attenzione quotidianamente che non siano presenti liquidi all'interno delle cavità.

Aspetti che richiedono particolare attenzione:

- I prodotti Velumount® con danni da morso, rottura del filo o altri difetti vanno immediatamente sostituiti.
- Rispettare la durata di utilizzo indicata.
- Non accorciare in nessun caso le aste dell'apparecchio Velumount® original sul labbro superiore. Una lunghezza minima di 1,5cm è necessaria per una tenuta salda e sicura.

Velumount® original

Istruzioni per l'uso dei prodotti Velumount®

Velumount® original
Velumount® Intro

Impiego

Per ridurre il russamento e le apnee ostruttive nel sonno.

I prodotti Velumount® si possono utilizzare soltanto previo adattamento individuale eseguito da un trainer Velumount® specializzato, in possesso di attestato. Le forme adattate individualmente non sono utilizzabili da altri.

Velumount GmbH, Zeughausgasse 16, CH-3011 Berna

E-mail: info@velumount.ch

Tel. +41 (0) 31 351 00 71

Web: www.velumount.ch

Ultimo aggiornamento: giugno 2024



Perché diversi prodotti Velumount®?

La scelta dei diversi tipi di forma e materiali dipende dalle caratteristiche anatomiche di ogni singolo utilizzatore.

Materiali utilizzati

Velumount® original (apparecchio)

Rivestimento: silicone catalizzato al platino USP classe VI

Interno: silicone

Nucleo: filo di acciaio armonico ad alto tenore di legante

Velumount® Intro (anello)

Rivestimento: silicone catalizzato al platino USP classe VI

Chiusura: silicone

Nucleo: filo di acciaio armonico ad alto tenore di legante

Durata di utilizzo

Durante l'uso, i prodotti Velumount® sono soggetti a elevati carichi di flessione che nel tempo portano alla rottura del filo. Di conseguenza la durata di utilizzo è limitata.

Velumount® original (apparecchio)

Massima durata di utilizzo: 6 mesi

Velumount® Intro (anello)

Massima durata di utilizzo: 6 mesi

Garanzia

Sui prodotti Velumount® Intro e original hai una garanzia di tre mesi dalla data di acquisto. In questo lasso di tempo, in caso di rottura del filo o di rivestimento non impermeabile, il prodotto Velumount® viene sostituito gratuitamente.

Limitazioni d'uso

Bambini e adolescenti

I prodotti Velumount® non devono essere usati da bambini e adolescenti sotto i 16 anni.

Malattie epatiche

In caso di malattie epatiche gravi o alcolismo, i vasi sanguigni venosi nell'esofago possono essere soggetti a forte sanguinamento (varici esofagee). In presenza di tali modificazioni nell'esofago, Velumount® non deve essere utilizzato.

Precauzioni

Epilessia

Le persone che soffrono di epilessia devono consultare il medico prima di usare Velumount®.

In linea di principio, i pazienti epilettici dovrebbero trattare efficacemente l'eventuale russamento e/o l'eventuale apnea notturna. La buona riuscita della terapia con il metodo Velumount® deve essere comprovata dalla poligrafia.

Anticoagulanti

In caso di assunzione regolare di medicinali anticoagulanti, come i derivati della cumarina (Marcumar®, Sintrom®) o i nuovi anticoagulanti (es. Xarelto®), Velumount® può essere usato soltanto in caso di buona regolazione della dose (tempo di Quick) o dopo aver consultato il medico.

Contatti

Hai una domanda, un'osservazione o un suggerimento? Saremo lieti di ricevere una tua comunicazione! Puoi contattarci via e-mail all'indirizzo info@velumount.ch oppure telefonando al numero +41 (0) 31 351 00 71.

Mantenimento della forma

Per poter indossare l'apparecchio con il massimo comfort è indispensabile seguire le misure di seguito descritte per conservarne la forma. Tali misure contribuiscono anche ad assicurare un corretto funzionamento:

- I movimenti di torsione necessari per inserire e togliere l'apparecchio Velumount® original devono essere eseguiti osservando le istruzioni fornite a parte (sequenza di immagini).
- I prodotti Velumount® non devono essere schiacciati quando vengono riposti e trasportati. Perciò vanno tenuti nella scatola ricevuta in dotazione o in un contenitore altrettanto robusto.

Se tuttavia dovessero sorgere problemi di forma o di funzionamento, fissare un appuntamento con l'assistenza post-vendita.

Indicazioni generali

Se al primo utilizzo compare dolore significa che l'adattamento dell'apparecchio non è stato sufficiente. La prima notte non si dovrebbe incontrare nessuna difficoltà a deglutire o a parlare. Neanche la respirazione nasale a bocca chiusa deve risultare difficoltosa.

Se si manifestano i sintomi di cui sopra, o se continui a soffrire di russamento ricorrente e/o di difficoltà di respirazione, contattaci al più presto.

Assistenza post-vendita

I primi tre interventi di assistenza post-vendita sono compresi nel iniziale. Durante un intervento di assistenza post-vendita si possono apportare importanti correzioni.