




Velumount Original - Einsetzen

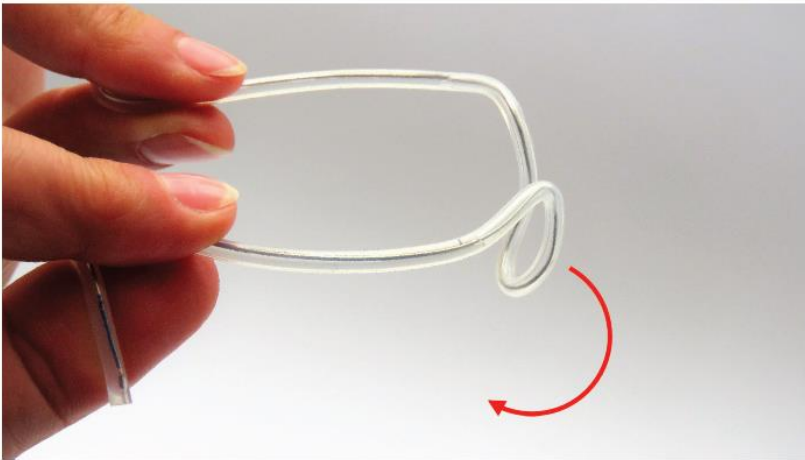

Spange mit Pharynxbogen nach unten mit Zeigefinger und Daumen greifen. Anschliessend **wenden**, damit der Pharynxbogen nach oben positioniert ist. Dabei die Hände zusammenhalten.

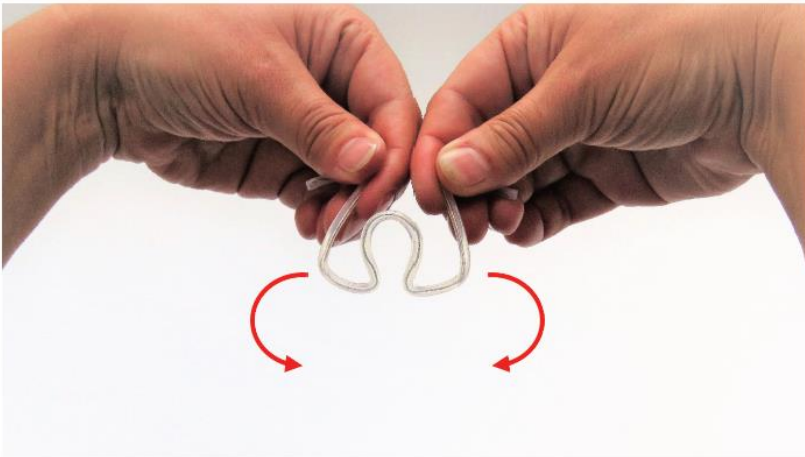

Die Spangenenden **rotieren** bis der Pharynxbogen leicht nach unten geneigt ist. Die Hände weiterhin zusammenhalten.

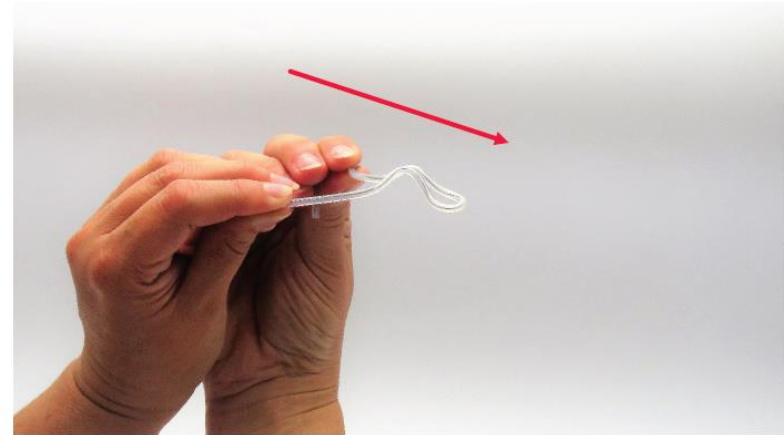

Einführen mit **Neigung nach unten**, bis sich der Pharynxbogen unter dem Halszäpfchen befindet.



Bei geschlossenem Mund die Spangenenden **an den Mundwinkeln zurückrotieren**, damit der Pharynxbogen hinter dem weichen Gaumen zu liegen kommt.