


Velumount Intro - Einsetzen ohne Hilfsmittel
Darstellung für Rechtshänder

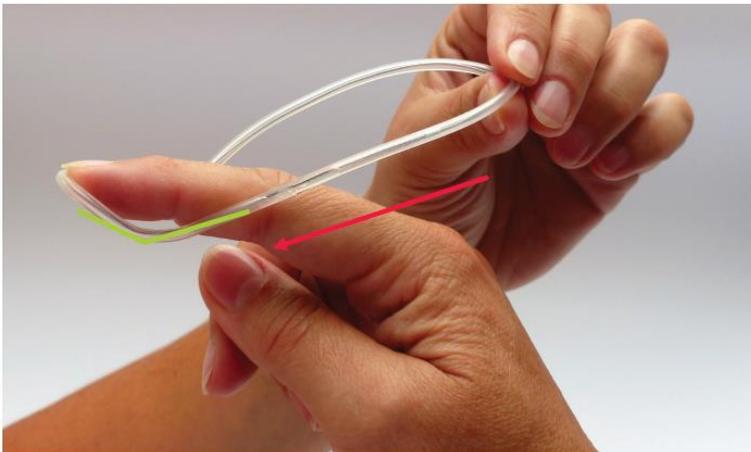


Fingerspitze am Pharynxbogen **leicht dezentriert** ansetzen.




Den Intro **leicht spannen** und **nach unten geneigt** einführen. Zeigefinger gestreckt halten und Intro in den Mundraum hinter die Zahnreihe nachstossen. Mund schliessen. Finger erst entfernen, wenn der Intro hinter dem Gaumensegel liegt. Intro final vor der Zahnreihe platzieren.

Velumount Intro - Einsetzen mit Mundspatel
Darstellung für Rechtshänder

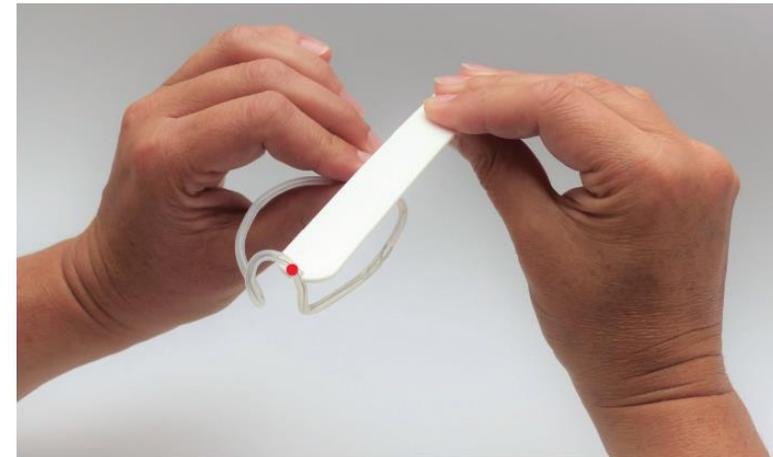

Spatel am Pharynxbogen **leicht dezentriert** und horizontal ansetzen.

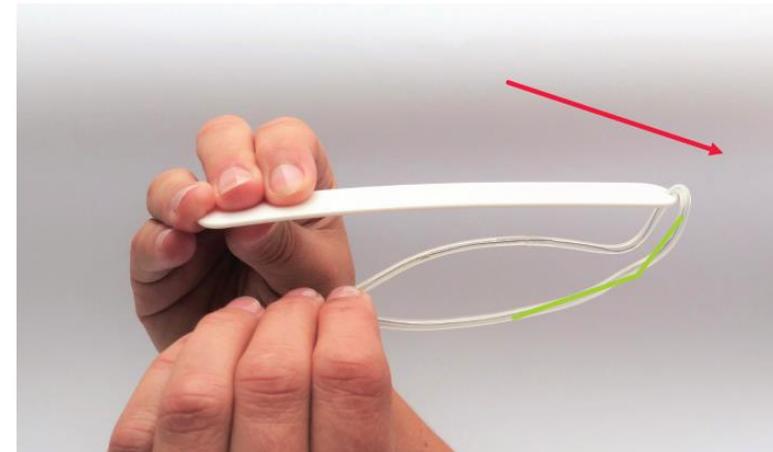

Den Intro **leicht spannen** und **nach unten geneigt** einführen. Intro in den Mundraum hinter die Zahnreihe nachstossen. Mund schliessen. Mundspatel erst entfernen, wenn der Intro hinter dem Gaumensegel liegt. Intro final vor der Zahnreihe platzieren.